

使用方法

参考資料

ブラッシングの
チェックに

リキッドタイプ

①綿球や綿棒に染色液を含ませ、歯の表面（特に歯頸部との境目、歯間部、舌側、咬合面など）に塗布します。


または、コップに少量の水（約5ml）をとり、染色液3〜5滴を加えた後、口に含んで広げます。



②少量の水を口に含み軽く口をすすぎます。



③赤紫に染まった部分が歯垢（プラーク）です。その部位をしっかり確認してください。

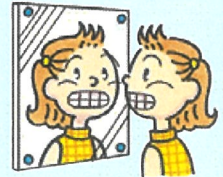

綿棒タイプ

①アルミパックから染色液を含ませた綿棒を取り出し、歯の表面（特に歯頸部との境目、歯間部、舌側、咬合面など）に塗布します。



※綿棒の取り出し方は下図をご覧ください。



④赤紫に染まった部分に歯ブラシの毛先を当てて、ていねいにブラッシングし、歯垢（プラーク）を取り除きましょう。



DENT.プラークテスター 綿棒タイプ (取り出し方)




アルミパックの表示側に染色剤を含ませた綿球が入っています。

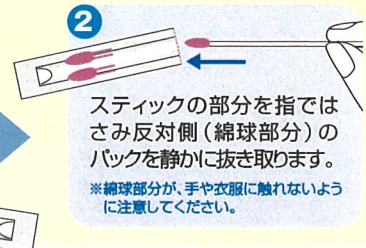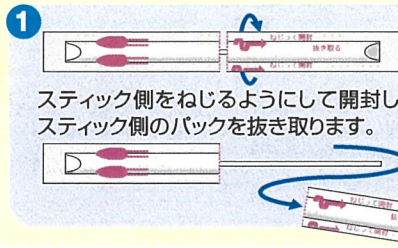


当社従来品と比べて、皮膚や衣類に誤って付着した場合に落としやすくなりました。

① 皮膚洗浄テスト (当社データ) 3分放置後 3分流水洗浄 (50ストローク)

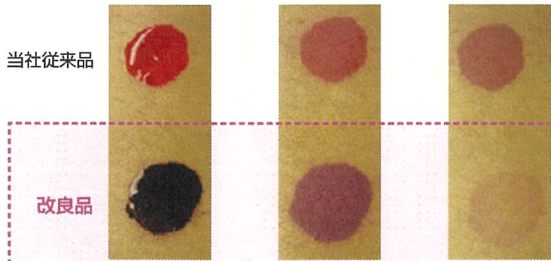

② 綿布洗浄テスト (当社データ) 染色剤 綿タオル滴下10分風乾 → 流水洗浄 (3分) → 流水洗浄 (5分)

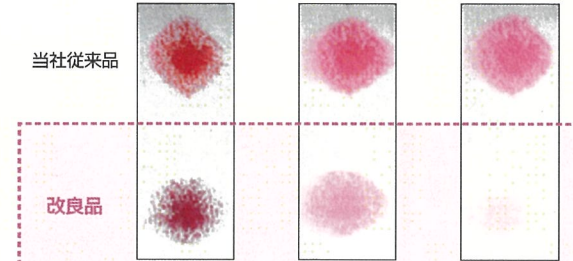

使用上の注意

- 使用するときには衣服につかないよう、あらかじめタオルなどでカバーしてください。
- 衣服についた場合はすぐに水洗いし、衣料用漂白剤かドライクリーニングで落としてください。
木綿やポリエステルの場合は、すぐに水洗いするか、洗剤+酸素系漂白剤で処理してください。羊毛やシルク、ナイロンの場合は、タンパク質と同様の化学組成を有しているため色素が付着しやすく、木綿などより落とすのが難しくなります。いずれの場合も繊維に対する浸透性や付着性が高いため、完全に落とすことは難しくなりますので、付着しないよう留意してください。

- 染色液が付着すると口腔粘膜や舌、口唇、皮膚等も染まります。この場合、すぐには落ちませんが半日から1日程度で徐々に落ちていきますので、染色部分を無理にこすったりしないでください。
- 発疹などの異常が現れたときは使用を中止し、医師に相談してください。
- 歯科医師、歯科衛生士の指導のもとにご使用ください。

保護者の方へ
ご確認ください。

仕様

商品名	容量・入り数	メーカー希望価格
DENT.リキッド プラークテスター	6ml	250円
	50ml	1,100円
DENT.プラークテスター 綿棒タイプ	100本 (1本ずつアルミパック入り)	2,400円 (100本)

染色液の成分

色素: 食用赤色106号*
 香味剤: 香料 (ストロベリータイプ)、サッカリンナトリウム
 保存料: パラベン
 その他: 水、グリセリン、エタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸

*赤色106号 (一般名: アシッドレッド) 日本では食品添加物として使用が認められており【食品添加物公定書】(厚生労働省発行)に収載、農水産加工品(でんぷ、福神漬、みそ漬、桜えび、ハム、ソーセージなど)、菓子(和洋菓子、焼菓子)などに広く用いられているほか、医薬品、医薬部外品、化粧品に使用が認められています。

※価格には消費税は含まれておりません。

ライオン歯科材株式会社

〒130-8544 東京都墨田区横綱1-2-22 ☎03(3621)6183

ライオン歯科材 検索

http://www.lion-dent.com

株式会社モリタ